



Anleitung für MedicFX Wundmodelle und Überzug-Wundmodelle

Anbringen der Wundmodelle

- 1 Wählen Sie ein Wundmodell in richtiger Größe und Hautfarbe. Die Wundmodelle sind standardmäßig in vier verschiedenen Hauttönen erhältlich: sehr hell, hellbraun europäisch, dunkel afrikanisch und Puppenhautfarbe. Setzen Sie immer die zum Schauspieler oder Modell passenden Farbe ein, um den bestmöglichen Trainingseffekt zu erzielen. Hellbraun ist die Standardfarbe für Wunden.
- 2 Bringen Sie das Wundmodell genau dort an, wo es benötigt wird. Säubern Sie zuvor die Haut mit etwas Alkohol. Dann lösen Sie das Wundmodell vorsichtig vom Träger ab und drücken dieses auf den gesäuberten Bereich. Das Wundmodell bleibt von selbst haften. Für längeren Gebrauch oder bei „hartem“ Einsatz empfehlen wir unseren zusätzlichen FXGlue-Gel-Kleber oder die Pros-Aide Cream mit erhöhter Haftkraft.

Der Einsatz von FXGlue-Gel und Pros-Aide Cream Kleber

- FXGlue-Gel ist ein MEDICFX-Gelatineprodukt. Damit lassen sich die Wundmodelle sicher befestigen. Erwärmen Sie dazu das FXGlue-Gel 5 bis 10 Sekunden lang in der Mikrowelle. Tragen Sie das Gel mit einem Pinsel oder Spatel auf die Rückseite der Wunde auf und drücken Sie es dann auf die Haut. Beachten Sie, dass das Gel heiß sein kann!
- Pros-Aide Cream ist ein medizinischer Acrylkleber und bietet enorme Festigkeit und Haftung. Bringen Sie eine dünne Schicht Pros-Aide Cream sowohl auf die Haut, als auch auf die Rückseite des Wundmodells auf. Lassen Sie die Cream antrocknen, bis sie durchsichtig ist und drücken Sie dann das Wundmodell auf die vorbereitete Haut, bis alle Ränder gut haften.
- Falls Sie einen perfekten Übergang zu Haut herstellen wollen, verwenden Sie etwas mehr Gel oder Cream am Rand des Wundmodells, um es dort mit einem Übergang an die Haut anzupassen. Mit etwas Babypuder können Sie die überschüssige Klebrigkeit aufheben.

Optimierung der Wundmodelle

- MedicFX Wundmodelle können Sie mit Fett- oder Alkoholfarben färben und mit Schmutz versehen, um noch bessere Wundeffekte zu erzielen. Diese Farben/Verschmutzungen bleiben nicht dauerhaft am Modell haften und lassen sich entfernen. Es ist nicht empfehlenswert, die Hautfarbe der Wunde mit einer anderen Hautfarbe zu ändern, da dies fleckig aussehen kann.
- Das Wundmodell kann mit Kunstblut versehen werden. Diese neigt meist dazu am Silikon des Modells abzuperlen. Fügen Sie dem Blut einfach etwas Spülmittel zu, damit es besser am Modell haftet.



Behandlung der Wundmodelle

- Sie können die Wunden genauso behandeln, wie Sie es normalerweise mit einer echten Wunde machen würden. Allerdings sollten keine öligen Produkte verwendet werden, da dies die Klebrigkeit des Wundmodells beeinträchtigen könnte.

Wunden entfernen und aufbewahren

- 1 Nach dem Gebrauch können Sie die ohne Kleber und mit FXglue angebrachten Wunden einfach vorsichtig abziehen. Bei Wundmodellen, die mit Pros-Aide Cream befestigt wurden, benötigen Sie Pros-Aide Remover, um die Wunden abzulösen.
- 2 Spülen Sie die Wundmodelle unter lauwarmem Wasser ab. Die klebrige Rückseite wird nach dem Waschen weiter klebrig bleiben. Trocknen Sie die Wundmodelle mit einem Stoff- oder Papierhandtuch ab. Stellen Sie sicher, dass die Modelle vor dem Einlagern vollständig trocken und sauber sind. Fixieren Sie das Wundmodell wieder auf dem Träger und packen Sie alles zusammen in eine Plastikbehälter oder eine Plastiktüte. Bewahren Sie die Modelle an einem dunklen und kühlen Ort auf.

MedicFX Überzug-Wundmodelle

- 1 Wählen Sie ein Überzug-Wundmodell in der richtigen Größe und Hautfarbe.
- 2 Ziehen Sie das Wundmodell über das gewünschte Körperteil.
- 3 Optimieren Sie Ihr Überzug-Wundmodell, wie oben beschrieben.
- 4 Die Überzug-Wundmodelle lassen sich wie die echten Wunden behandeln, die sie simulieren. Sie können geklebt, bandagiert und mit warmem/kaltem Wasser sowie Alkohol gereinigt werden. Einige Wunden können auch aufgeschnitten und wieder zusammengenäht werden, wenn sie über einen Netzzücken verfügen.
- 5 Nach Gebrauch ziehen Sie das Überzug-Wundmodell vom Körper und waschen es unter lauwarmem Wasser ab. Trocknen Sie es mit einem Stoff- oder Papierhandtuch und einem Haartrockner für tiefere, schwer zugängliche Bereiche, falls notwendig. Pudern Sie das trockene Wundmodell leicht mit Baby- oder Talkumpuder und lagern Sie es in einem Plastikbehälter oder einer Plastiktüte. Bewahren Sie es an einem dunklen und kühlen Ort auf.

Haltbarkeit

Gut behandelte MedicFX Wundmodelle sind lange haltbar. Sie werden alle aus robustem Silikon hergestellt, das weder bricht noch reißt. Durch ausgiebige Nutzung kann normaler Verschleiß auftreten. Die größeren Modelle können mit einem Reparatur-Set ausgebessert werden.